


Fäden gegen die Alterung
der Haut und des Körpers

Aptos[®]
Soft Fast Lift

Happy Lift[™]
Revitalizing

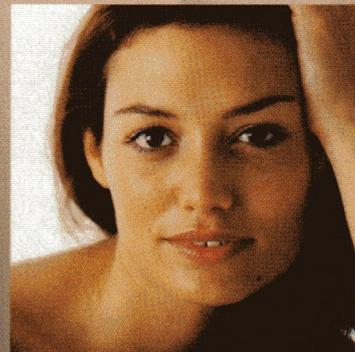


Aptos® Soft Lift sind Fäden aus Polypropylen, einem bei vielen Nahtmaterialien eingesetzten Material. Sie sind mit Widerhaken ausgestattet, deren bestimmte Länge, Ausrichtung und Dichte einen Lifting-Effekt des erschlafften Gesichtsgewebes fördert.

Aptos®-Fäden werden zur Hebung und Formung von erschlafften Gesichtspartien eingesetzt. Die häufigsten Anwendungsgebiete sind Schläfen, Augenbrauen sowie Wangen-, Kiefer- oder auch der Halsbereich. Aptos-Fäden können entweder allein oder als Ergänzung des traditionellen Lifting verwendet werden.

Aptos®-Fäden sind an den Seiten mit speziellen feinen Widerhaken versehen. Von der Mitte des Fadens ausgehend verlaufen die Widerhaken in entgegengesetzte Richtungen, wobei die Spitzen der Zähnchen zur Mitte zeigen.

Die Struktur des **Aptos-Fadens®** ermöglicht die Straffung und Hebung des Weichgewebes und einen Lifting-Effekt. Mit Einsetzen in die Hypodermis und durch Ziehen an ihren Enden entsteht eine Zugwirkung, die zur Straffung führt, so daß sich die vielen Widerhaken spiralförmig im Gewebe nach dem Grundsatz oder dem Aufbau einer „Fibonacci-Reihe“ verteilen.

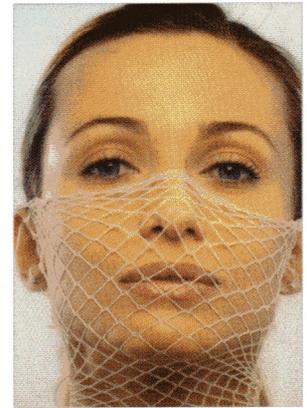


Darstellung der verschiedenen, mit Aptos® Soft Fast



Kieferregion



Schläfe

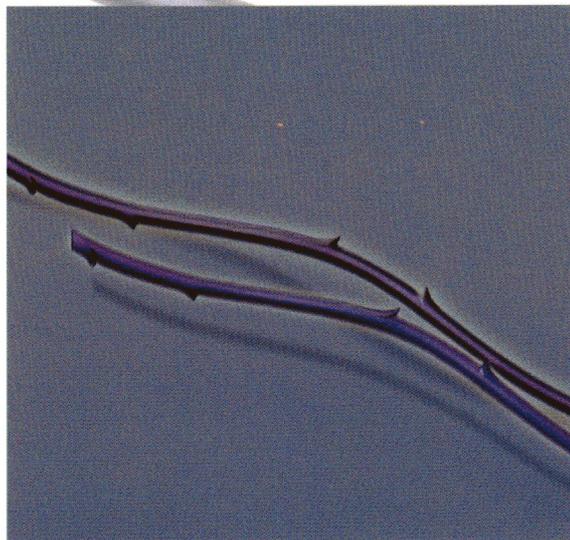

Packungsgrößen:

Aptos®-Fäden von 120 mm Länge - Packung mit 6 Fäden

Aptos®-Fäden von 230 mm Länge - Packung mit 6 Fäden

Aptos®-Fäden von 300 mm Länge - Packung mit 6 Fäden

Flexible Kanülen:

20 G 0,91 mm OD x 152 mm - empfohlene Kanüle für die Anwendung im Bereich der Augenbrauen.

16 G 1,6 mm OD x 120 mm - empfohlene Kanüle für die Anwendung im Halsbereich.

Operatives Vorgehen:

1. Der Verlauf der Fäden wird auf der Haut angezeichnet.
2. Es erfolgt eine lokale Betäubung.
3. Die Führungskanüle wird gemäß den vorgezeichneten Linien in die Hypodermis eingeführt.
4. Die Fäden werden in die Kanüle geschoben.
5. Die Kanüle wird entfernt, wobei die Fäden in der Haut verbleiben.
6. An beiden Enden des Fadens wird gezogen damit sich die Verlängerungen im Gewebe festsetzen und die geeignete Lage zum Auslösen des Lifting-Effekts finden.
7. Die Fadenenden werden gekürzt und verbleiben unter der Haut.
8. Es entstehen keine Narben.
9. Die operierten Patienten können nach dem Eingriff sofort wieder ihr normales Leben und ihre Arbeit aufnehmen.
10. Nach der Operation sind folgende Empfehlungen zu befolgen: heftige Gesichtsbewegungen oder extrem heißes Essen vermeiden,

Happy Lift™ Revitalizing

Resorbierbare Fäden



Happy Lift™ Revitalizing ist der erste resorbierbare Nähfaden zur Straffung und Revitalisierung von erschlafftem Gesichtsgewebe.

Happy Lift™ Revitalizing ist ein PDO-Faden (Polydioxanon - Polylaktid-Copolymer - Caprolacton X), der nach einem patentierten Rezept verändert wurde, um als chirurgischer Nähfaden verwendet werden zu können.

Happy Lift™ Revitalizing-Fäden werden 8 bis 10 Monate nach der Implantation in das Weichgewebe zu 100 % resorbiert. Die Struktur des Fadens wurde so modifiziert, daß Widerhaken spiralförmig um die Achse des Fadens angeordnet sind.

Happy Lift™ Revitalizing wird für die Ausformung, Repositionierung und Straffung von erschlafftem Gesichtsgewebe angewendet. Es kann zum Lifting des Schläfen- oder Stirnbereichs, der Augenbrauen, der Wangen- und Kieferpartie, des Halses, des Bichat-Fettkörpers sowie bei anderen endoskopischen Lifting-Verfahren angewendet werden.

Die besondere spiralförmige Anordnung der **Happy Lift™ Revitalizing**-Fäden erhöht die Haltekraft des erschlafften Gesichtsgewebes und unterstützt Zug- oder Drehkräfte.

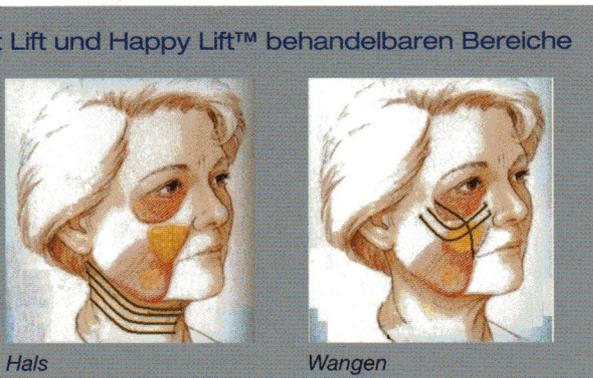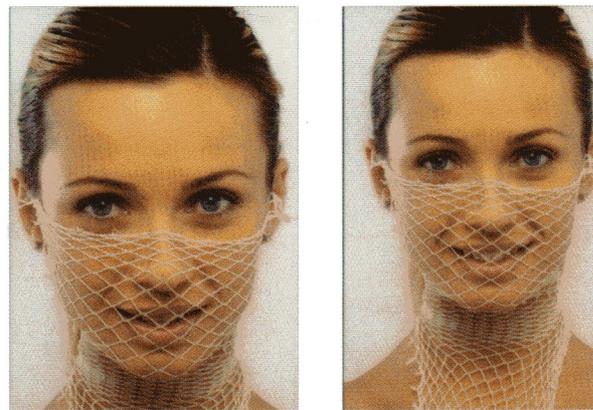

Operatives Vorgehen:

Das Verfahren zur Implantation von Happy Lift™ ist relativ einfach: Der Faden wird an der gewünschten Stelle mit einer Führungskanüle eingezogen (gemäß dem gleichen Verfahren wie für Aptos® Fäden).

Packungsgrößen:

- Hilos Happy Lift™** - Fäden von 120 mm Länge - Packung mit 6 Fäden.
- Hilos Happy Lift™** - Fäden von 230 mm Länge - Packung mit 6 Fäden
- Hilos Happy Lift™** - Fäden von 300 mm Länge - Packung mit 6 Fäden

Flexible Kanülen:

20 G 0,91 mm OD x 152 mm

empfohlene Kanüle für die Anwendung im Bereich der Augenbrauen

16 G 1,6 mm OD x 120 mm

empfohlene Kanüle für die Anwendung im Halsbereich

Happy Lift™ **CE 0373**