


more than products...



Happy Lift™
Ancorage 

Anchor Your Age

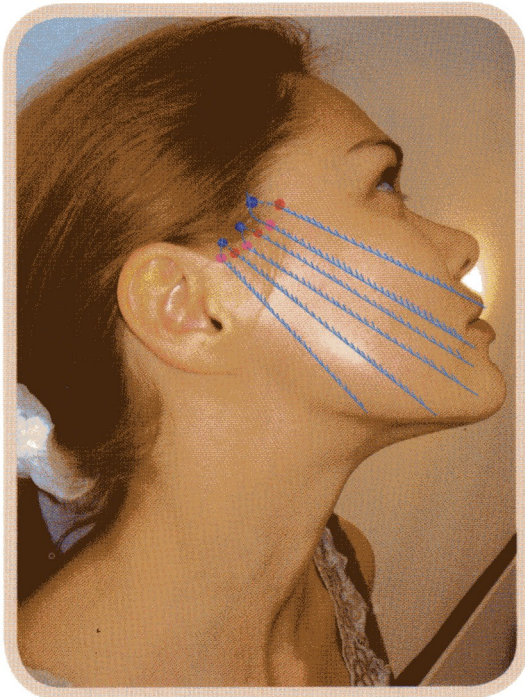


Welche Bereiche können behandelt werden?

Happy Lift Revitalizing™ Ancorage ist indiziert zur:

- Wangenstraffung
- Augenbrauanhebung
- Profilkorrektur und Remodellierung im Kieferbereich
- Halshautstraffung
- Angleichung von asymmetrischen Augenbrauen und Gesichtern

Was macht Happy Lift Revitalizing™ Ancorage anders als andere, bereits existierende Fäden mit Widerhäkchen?

Im Unterschied zu herkömmlichem, glattem Nahtmaterial weisen die Fäden von Ancorage kleine, hakenartige Widerhaken auf. Diese ähneln den bereits bekannten Happy Lift Revitalizing™ Fäden, sind jedoch eindirektional statt bidirektional. Dank ihrer besonderen Struktur und der mitgelieferten geraden Einführungsnadel wird zum Einbringen keine Kanüle benötigt und genau das macht den großen Unterschied der Happy Lift Revitalizing™ Fäden aus. Sobald sie unter die Haut gebracht wurden, werden sie fixiert wie ein Regenschirm, der aufgespannt wird. Sie erzeugen so eine Spannung, die für die Aufhängung gebraucht wird, um das schlaffe Gewebe an Augenbrauen, Gesicht und Hals zu heben.

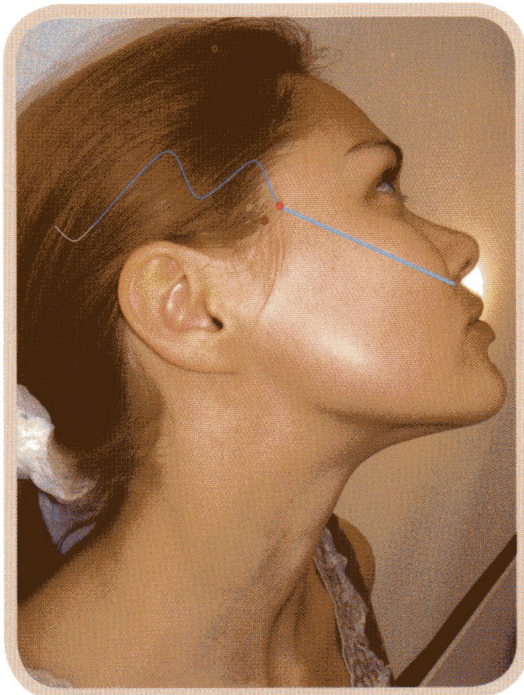


Wie funktioniert das?

Dank der einzigartigen Formgebung der Fadenwiderhaken von Ancorage trägt das Umgebungsgewebe den Faden, ohne dass sichtbare Narben zurückbleiben. Bei Eingriffen im mittleren Gesichtsdrittel muss der Chirurg kleine Einschnitte in der Nähe des Ohres vornehmen und die Fäden an den markierten Linien in Richtung Kinn und Kieferprofil führen. Auf diese Weise wird eine feste Stütze des Gewebes geschaffen, ohne zusätzliche Traumata zu verursachen. Die Aufgabe der Widerhaken ist es, die Aufhängung zu übernehmen, da sie sich mit dem Gewebe verbinden.

Wie lange dauert das Verfahren?

Lokalanästhesie, es kann intravenös sediert werden. Die Dauer des Vorgangs ist von der Anzahl der Fäden abhängig, die implantiert werden sollen. Im Standardverfahren (4 bis 6 Fäden pro Seite) kann er in weniger als einer Stunde durchgeführt werden. Wenn mehr als 6 Fäden eingebracht werden müssen, ist der Patient zu monitorisieren und zu sedieren.

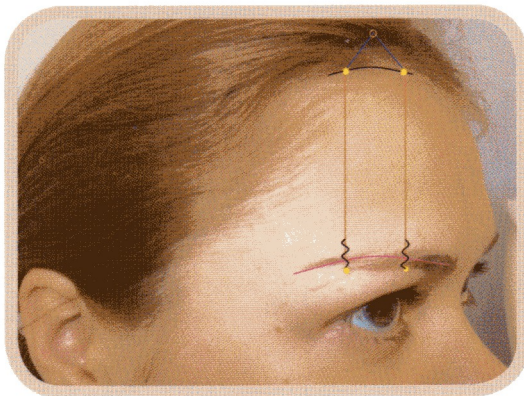

Wie lange muss der Patient in der Klinik bleiben?

Eine stationäre Behandlung ist nicht erforderlich. Der Patient muss nach dem Eingriff lediglich ein bis zwei Stunden in der Klinik bleiben, bevor er wieder nach Hause kann.

Kann der Patient sofort wieder in

seinen normalen Alltag zurück?


Es sind ein paar Tage erforderlich, bis der Patient seinen normalen Alltag wieder aufnehmen kann. Dies hängt von der Anzahl der implantierten Fäden und der behandelten Bereiche ab.

Welche Nebenwirkungen können auftreten?

Gelegentlich können Entzündungen und leichte Schmerzen auftreten, die mit einem einfachen Schmerzmittel behandelt werden können. In den ersten zwei Stunden nach dem Eingriff empfiehlt es sich, kalte Kompressen aufzulegen. Manchmal können sich kleine Hämatome bilden, die bei anti-ödematöser Behandlung verschwinden.

Kann diese Behandlung mit anderen Verfahren der Schönheitschirurgie kombiniert werden?

Zwar werden durch einen einzigen Eingriff mit Ancorage ausgezeichnete Ergebnisse erzielt, aber er kann auch mit anderen schönheitschirurgischen Verfahren kombiniert werden, wie zum Beispiel mit Botulin-Toxin (zur Reduzierung der Aktivität der Gesichtsmuskeln), Produkte zum Auffüllen der Haut wie Hyaluronsäure (zur Volumenbetonung), Peelings, Laser und Radiofrequenztherapien (zur Verbesserung der Hauttextur). Die Fettabsaugung am Hals ist ein weiteres Parallelverfahren, das als Ergänzung zur Behandlung mit Ancorage-Fäden durchgeführt werden kann.

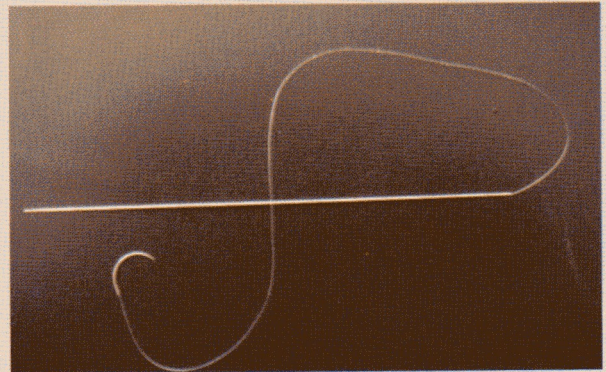

Atraumatische Nadel, gerade, 15 cm.
PDO-Faden (Polydioxanon), 31,6 cm mit
eindirektionalen Fortsätzen im mittleren Teil.
Wundnadel, 3,5 cm.

Die Fäden Happy Lift™ Ancorage sind mit patentierten
eindirektionalen Fortsätzen versehen, die zur
Aufhängung und Anhebung des Gesichtsgewebes am
Unterhautgewebe haften bleiben. Nach dem
Implantieren und im Anschluss an die Fibrose lösen
sie sich auf und erhalten mittel- oder langfristig den
Lifting-Effekt.*



Happy Lift™
Ancorage 

*PCT ist Eigentum von Promoitalia Internacional S.r.l., All rights reserved.